

Zurück zu Deinem vertrauten
Körpergefühl.

3D-Areola Prothetik

Deine individuell gefertigte
Areola-Prothese – natürlich, sanft und
passend zu Dir.

Anwendung, Entfernung & Pflege



MELISSA WEFERS

PERMANENT MAKE-UP
MED. BRUSTWARZENTÄTOWIERUNG

www.melissa-wefers.de



Vorbereitung



1. Den Klebstoff vor Gebrauch gut schütteln.
2. Reinige Deine Haut gründlich mit Wasser und Seife, um Öle und Rückstände zu entfernen.

Deine Haut sollte vor dem Auftragen sauber, fettfrei und vollständig trocken sein.



Auftragen



1. Trage den Klebstoff mit einem Pinsel entweder direkt auf die Haut oder auf die Rückseite der Prothetik auf.
2. Lass den Klebstoff kurz antrocknen, bis er klar und haftbereit ist.
3. Positioniere die Prothetik anschließend an der gewünschten Stelle und drücke sie gleichmäßig an.

Je gleichmäßiger und fester der Druck, desto sicherer hält die Prothetik.



Entfernung



1. Trage den Remover mit einem Wattestäbchen, Wattepad oder Pinsel vorsichtig an den Rändern der Prothetik auf.
2. Löse die Prothetik langsam und behutsam – bitte nicht ziehen.

Sobald sich ein Rand löst, erneut etwas Remover auftragen und Schritt für Schritt weiterarbeiten.



Wichtige Hinweise zur Pflege



Nachpflege Deiner Haut & Prothetik



Deine Haut

Reinige Deine Haut nach dem Entfernen mit einer milden oder pH-neutralen Seife.

Trage anschließend eine Feuchtigkeitscreme auf, um Deine Haut zu beruhigen und zu pflegen.



Deine Prothetik

Reinige die Prothetik nach dem Entfernen gründlich und vorsichtig mit milder Seife und Wasser.

Bei Kleberresten kannst Du den beigelegten Remover verwenden, um diese sanft zu entfernen.

Lass die Prothetik anschließend vollständig trocknen.

Bewahre die trockene Prothetik in der mitgelieferten Aufbewahrungsdose auf.

Damit Deine Prothetik geschmeidig bleibt, kannst Du die Oberfläche gelegentlich mit etwas Vaseline pflegen.

So ist Deine Prothetik jederzeit wieder einsatzbereit.



**Natürliche
3D-Haptik**



**Individuelle Farb-
& Formanpassung**



Wasserfest
(Duschen & Baden)



**Wiederverwendbar
& langlebig**



Schweißresistent
(Sport, Yoga & Sauna)

Tragehinweise

Wichtig für Dich

- ✓ Die Prothetik kann bis zu **48 Stunden am Stück** auf Deiner Haut getragen werden.
- ✓ Sie ist **wasserfest** und kann problemlos beim Duschen, Schwimmen und Saunieren getragen werden.
- ✓ Sollten sich an den **Rändern** kleine **Bläschen** oder **Ablösungen** bilden, kannst Du:
 - die Stelle vorsichtig nachkleben
 - oder die Prothetik vollständig lösen und neu anbringen.
- ✓ Bitte **kontrolliere regelmäßig**, ob die Prothetik noch flach und sicher aufliegt.



#dubistwertvoll



MELISSA WEFERS

PERMANENT MAKE-UP
MED. BRUSTWARZENTÄTOWIERUNG



Herzogstr. 49
46145 Oberhausen

0172 68 82 03 9
info@melissa-wefers.de
www.melissa-wefers.de